

FERTIL CONTROL

OVULATION TEST FOR
AUTO DIAGNOSTIC IN VITRO



Használat előtt olvassa el figyelmesen



1. Vegye le a rúzs formájú mini mikroszkóp kupakját.



2. Tartsa lenyomva a világítás kapcsolóját és forgassa a fekete színű optikai egységet addig, amíg élesnek nem látja a képet.



3. Húzza ki az optikai egységet a csőből, de ne csavarja. Távolítsa el a védő fóliát.



4. Helyezzen cseppnyi nyálmintát a belső felületére és várjon kb. 15-20 percet a száradásig. Ügyeljen rá, hogy ne keletkezzenek légbuborékok.



5. Ha a minta megszáradt, helyezze vissza az optikai egységet a helyére.




6. Nézzen bele a mikroszkópba, miközben nyomva tartja a világítás kapcsolóját. Ha esetleg szükséges az élesség állítása, tekerjen a fekete színű optikai egységen.

A TESZT EREDMÉNYÉNEK ÉRTELMEZÉSE



Nem termékeny

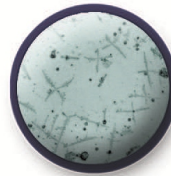

Átmenet



Termékeny

A Fertil Control Light egy kisméretű ovulációs mikroszkóp, amely a nyálminta vizsgálatával a női ciklus legtermékenyebb időszakának egyszerű meghatározására alkalmas. Az eszköz 2 évig használható. Mindennapos használata javasolt.

A mikroszkóp pontossága 98%.

Az evés, ivás ill. dohányzás befolyásolhatja a teszt eredményét ezért célszerű a mintavétellel kb. 2 órát várni a fenti tevékenységek bármelyike után. A módszert Dr. Biel és Dr. Papanicolaou fedezték fel a 40-es évek közepén.

- GYORS ÉS EGYSZERŰ
- HIGIÉNIKUS
- TERMÉSZETES
- MEGBÍZHATÓ
- OTTHONI HASZNÁLAT
- ÚJRA HASZNÁLHATÓ (2 ÉVIG)

Használatba vétel dátuma:

____/____/____



Az ovulációs mikroszkópot arra tervezték, hogy segítségével egyszerűen meghatározhassuk a hónap legtermékenyebb időszakát nyálminta segítségével.

Az eszköz egyetlen funkciója a legtermékenyebb időszak meghatározása. Fogamzásgátlás céljára nem alkalmas de praktikus és könnyen használható eszköz a tudatos családtervezés támogatására. Tudományosan bizonyított tény, hogy a spermiumok a méhen belül legfeljebb 72 óráig életképesek, míg a petesejt élettartama 24 óra. Ezért ciklusonként mindössze 3-4 nap termékeny (az ovuláció napja és az azt megelőző 2-3 nap).

A Fertil Control Light mini mikroszkóp 65-szörös nagyítású lencséket tartalmaz.

Az ovuláció alatt a női szervezet ösztrogén szintje jelentősen megemelkedik, aminek hatására a petesejt kiszabadul a petefészekből. A peteérés rendszerint 14 nappal a menstruációs vérzés előtt következik be.

Az ösztrogénszint a vérben, a nyálban és a vizeletben hirtelen megemelkedik. Ahogy az ösztrogénszint emelkedik, a nyálban lévő ásványi sók sokkal könnyebben kristályosodnak ki és jellegzetes páfrány mintát képeznek, amely a Fertil Control Light ovulációs mikroszkóppal jól láthatóak.

Az ovulációt követően a progeszteron szintje nőni fog, ami megakadályozza a páfrány minta kialakulását, csak alakatlan elszórt foltok jelennek meg a mikroszkópban.

- Nincs mellékhatás (semmi nem kerül a szervezetbe).
- Használata nem ütközik morális vagy vallási tilalomba.
- Újra felhasználható, ezért kifejezetten kedvező árú módszernek számít.
- Használata nem jár kellemetlenséggel.
- Könnyen kezelhető és diszkrét.
- Tiszta és könnyű használat.
- Megbízható.
- Kényelmes és egyszerű.
- Napi szinten történő használata segít jobban megismerni a ciklust.

- A nyálminta minőségét a dohányzás, az alkohol, ill. az étkezés befolyásolja. Emiatt javasoljuk, hogy a tesztelést megelőző 2 órán belül tartózkodjék ezen tevékenységektől.

A mikroszkópot érdemes a délelőtt vagy a délután közepén használni, amikor a nyál hígabb. Amikor sűrűbb, a kristályok nehezebben alakulnak ki.

- Gondosan távolítsa el a légbuborékokat a mintából.
- Végezze el minden nap a tesztet, így sokat tanulhat arról, hogy hogyan alakul a termékenysége a ciklus során.
- Használat után nedves törölkendővel tisztítsa meg a lencsét.
- Az első használat előtt állítsa be a fókuszot. Fordítsa el az optikai egységet, amíg a kép éles nem lesz.


- Gyulladások és szájfertőzések (mandulagyulladás, fogínygátlyog, fogínygyulladás stb.) valamint néhány gyógyszer és hormon kezelés befolyásolhatja az eredményt.

- A Fertil Control Light nem fogamzásgátlásra, hanem a női ciklus legtermékenyebb időszakának a meghatározására alkalmas eszköz. Az eredmények helyes értelmezése garantálja a megbízhatóságot.
- Ez az eszköz nem véd a nemi betegségekkel szemben. Ezzel kapcsolatos kérdésével keresse fel orvosát vagy nőgyógyászt.
- A mikroszkópot tartsa távol a gyerekektől, mert apró alkatrészeket tartalmaz.
- A Fertil Control Light megfelel a hatályos szabályoknak.
- Mivel a ciklus hossza több lehet mint 28 nap, a lenti táblázat 35 napot tartalmaz.
- A készülék gyártója és forgalmazója nem felelős az eredmények téves értelmezéséért.
- A Fertil Control Light nem alkalmas a változó korban lévő, fogamzásgátló tablettát szedő vagy hormonkezelés alatt álló nők számára. A terhesség után várjon 2 hónapot mielőtt újra használja a mikroszkópot.

Gyártó: POGGIO FIORITO, srl
via Cassia 701
00189 Roma, ITALIA

CE 0344

A használati utasítás utolsó felülvizsgálata: 2012 november

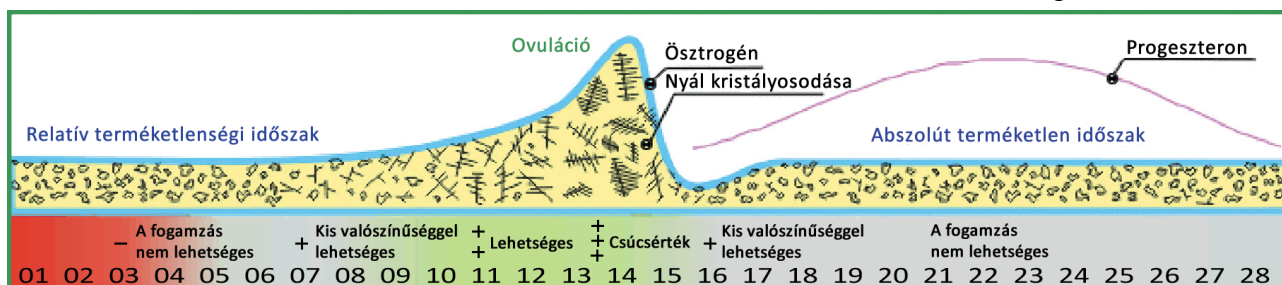[illegible]

R: menstruáció **NF:** terméketlen **PF:** átmenet **F:** termékeny

Minta táblázat a ciklus nyomon követéséhez:

[illegible]